



GIMA

PROFESIONÁLNÍ LÉKAŘSKÉ PRODUKTY

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Itálie

gima@gimaitaly.com -

export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

HODINKY PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY

Návod k použití

POZOR: Obsluha si musí před použitím výrobku pozorně přečíst tento návod a zcela mu porozumět.

REF

20400 - 20401 - 20402 - 20403 - 20404 - 20405 - 20420
20421 - 20422 - 20423 - 20424 - 20425 - 20410 - 20411
20455 - 20460 - 20461 - 20462 - 20463 - 20464 - 20465



Dovoz:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Itálie

Vyrobeno v Číně



Jak používat hodinky pro zdravotní sestry

Děkujeme, že jste si vybrali naše silikonové hodinky pro zdravotní sestry a doufáme, že s jejich používáním budete plně spokojeni.

Před zapnutím hodinek věnujte pozornost jakémukoli pohybu některé z ručiček. To je způsobeno tím, že ještě nebyl aktivován pohon pohybu. Po odstranění ochranného jazýčku baterie se ručička bude pohybovat pouze jedním směrem.

Chcete-li hodinky aktivovat, vytáhněte je ze silikonového těla a sejměte ochranný jazýček na nabíjecím mechanismu.

Zatáhněte za nabíjecí korunku, otočte jí, abyste nastavili čas, a zasuňte korunku do pouzdra, abyste ji uzamkli.

Nasaďte tělo hodinek na opačnou stranu, než je pojistný kolík.

Čištění

Vyjměte hodinky ze silikonového držáku a očistěte silikon hadříkem navlhčeným vodou a mýdlem nebo alkoholem při 70°.

Na tělo hodinek použijte vlhký hadřík, protože hodinky jsou vodotěsné.

HMOTNOST: 30 gramů.

BATERIE: Knoflíková baterie SR626SW (při vybité baterii ji vyhodte do sběrné nádoby, viz postup sběru baterií).

ŽIVOTNOST BATERIE: typicky 18 měsíců

VÝMĚNA BATERIE: na zadní straně hodinek je zářez pro otevření pouzdra a přístup k baterii. Zvedněte zadní část pomocí ostrého a tenkého nástroje. Vyjměte bílý plastový kryt a baterii posunutím na stranu.

Vložte novou baterii se správnou polaritou tak, aby značka „+“ směřovala nahoru. Nasadte bílý kryt a pouzdro zavřete.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GIMA

Gratulujeme k zakoupení produktu GIMA. Tento výrobek splňuje vysoké kvalitativní standardy jak z hlediska materiálu, tak i výroby. Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data dodání. Během doby platnosti záruky společnost GIMA zdarma opraví a/nebo vymění všechny díly, vadné z výrobních důvodů.

Na všechny součásti podléhající opotřebení se záruka nevztahuje.

Oprava nebo výměna provedená během záruční doby záruku neprodlužuje. Záruka zaniká v následujících případech: opravy provedené neautorizovaným personálem nebo s neoriginálními náhradními díly, závady způsobené nedbalostí nebo nesprávným použitím. Společnost GIMA nemůže být zodpovědná za poruchy elektronických zařízení nebo softwaru způsobené vnějšími činiteli, jako jsou: změny napětí, elektromagnetická pole, rádiové rušení atd. Záruka zaniká, pokud nebudou dodrženy výše uvedené předpisy a pokud sériový kód (pokud je k dispozici) byl odstraněn, zrušen nebo změněn.

Vadné výrobky mohou být vráceny pouze prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen. Produkty odeslané přímo společnosti GIMA budou odmítnuty.

Rejstřík symbolů

	Pozor: pozorně si přečtěte pokyny (varování)
	Uchovávejte na chladném suchém místě
	Postupujte podle návodu k použití
	Výrobek vyhovuje evropské směrnici
	Kód výrobku
	Chraňte před slunečním zářením
	Číslo šarže
	Likvidace elektrospotřebičů